

Therapie rheumatischer Erkrankungen

Physikalische Kausal-Therapie ohne Nebenwirkungen

Bisher waren Erkrankungen aus dem rheumatischen Formenkreis der medikamentösen Therapie vorbehalten. Antiphlogistika und in den meisten Fällen auch Kortison waren hier die bevorzugten Medikamente. Die Nebenwirkungen dieser Behandlung sind hinreichend bekannt. Nun, daran wird sich grundsätzlich zunächst einmal nichts ändern. Ein Berliner Hersteller hat in Zusammenarbeit mit einem interdisziplinären Forschungsteam von vier Universitäten und acht Instituten sowie der Humboldt-Universität Berlin-Ost jetzt jedoch ein Gerät entwickelt, das nach eigenen Angaben eine Reduzierung der Medikamente und eine schnellere Schmerzbefreiung in Aussicht stellt.



Standardtherapie, Kopfbefeldung, Patient liegt auf der Sonde (Linea nuchea)

www.150mhz.com

Eine Therapie mit Megamed 150/2 so lautet die Produktinformation, ermöglicht die gezielte, therapeutische Beeinflussung von Zellen, Organverbänden und Organismen. Grundlagenforschung und klinische Studien, die diese Aussage stützen, liegen vor und werden ständig aktualisiert.

ta... w... in... führte u.a. in... G... St... b... in eine Studie an 307 Patienten über den Zeitraum von

zwei Jahre... durch... Patienten... an... zum... mit dem... n... HF-Generator 150 und zum ande...

... mit dem portablen HF-Generator 20... therapie. Die Behandlung erfolgt... beim HF-150 bei einer... Spannung von 550 und im NF-Bereich... von 48 bis 55 Hz Modulationsfrequenz; beim HF-20, welches nicht regelbar ist, mit der im Werk eingestellten Spannung.

Worin liegt das Wirkprinzip von Megamed® 150/2?

Elektromagnetische Wellen - Hochfrequenzfeld mit definierten Modulationszügen - bieten hier neue therapeutische Ansätze. Selbst bei chronischer Rheumaerkrankung konnte nach einigen Untersuchungen auf Medikamente weitgehend verzichtet werden. Dies wiederum führt zu einer Entlastung des ohnehin geschwächten Stoffwechsels der Patienten. Die Wirkung NF-modulierter HF-Felder auf den Heilungsprozeß hängt von der Frequenz und Intensität des Feldes ab. Erste Erfahrungen gewann man durch die positive Beeinflussung verschiedener Schmerz-

NORMABRAIN®

ALLE DARREICHUNGSFORMEN AB 1.1.90 ZUM

FESTBETRAG